

USO CORRECTO DE MASCARILLAS

LOGO



Coloque la mascarilla en la palma de la mano con la parte superior hacia delante.



Sujete la mascarilla con la palma de la mano dejando que las bandas caigan hacia delante



Pase las bandas por detrás de la cabeza sin cruzarlas



Ajuste la banda frontal a la forma de la nariz



Coloque las manos sobre la mascarilla y aspire para comprobar que la mascarilla se ajusta bien a la cara



Con las manos tapando el frontal de la mascarilla, suelte aire por la nariz y la boca para comprobar que no sale aire



Si el aire sale por la zona de la nariz, reajuste la banda frontal, si sale por los lados, reajuste las bandas de la cabeza hasta que el ajuste sea bueno



Si no puede tener un buen ajuste, pida ayuda, pruebe con otra talla u otro modelo de mascarilla



NO TOQUE la parte frontal de la mascarilla



Saque primero la banda inferior y posteriormente la banda superior



Tire la mascarilla en el contenedor adecuado y lávese las manos

